

Dräger Alcotest 3000 Profi-Alkoholtestgerät für den privaten Gebrauch

Messtechnik, die sich seit 50 Jahren im Polizeieinsatz bewährt: Das Dräger Alcotest 3000 liefert Ihnen einfach, präzise und schnell Gewissheit, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Damit Ihre Mobilität nicht auf der Strecke bleibt.



D-17113-2009

MESSGENAU WIE EIN POLIZEIGERÄT

Auf diese Qualität setzen Polizisten bei Kontrollen weltweit: Das Alcotest 3000 arbeitet mit einem hochempfindlichen elektrochemischen Sensor, der spezifisch Alkohol misst. Selbst wenn etwa Zigarettenrauch in der Luft liegt, ermittelt dieser Sensor den präzisen Promillewert – auch bei minimaler Alkoholkonzentration.

EINSCHALTEN, PUSTEN, SICHER

Das Testgerät schalten Sie mit nur einem Knopf an und aus. Kurztexte und Signaltöne leiten Sie sicher durch den Messvorgang. Stecken Sie einfach ein frisches Mundstück auf das Gerät und drücken Sie den An-/Ausknopf. Sobald das Display „Bereit“ anzeigt, pusten Sie so lange ins Mundstück, bis der Signalton erlischt. Der Rest erledigt sich automatisch. Schon wenige Sekunden später haben Sie das eindeutige Ergebnis vor Augen.

KLARE ANZEIGE IN JEDER SITUATION

Das Display des Alkoholtestgeräts ist beleuchtet. Auch bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel in der Nacht, können Sie Ergebnis und Kurztexte leicht ablesen.

UNTERWEGS IMMER GRIFFBEREIT DABEI

Das Alcotest 3000 ist handlich und robust. Sie können es zum Beispiel in der Jackentasche mitnehmen oder im Handschuhfach Ihres Autos verstauen. Geliefert wird das Gerät in einer weichen Transporttasche inklusive Mundstücke und Batterien.

PROMILLEGENAUE WERTE WIE AM ERSTEN TAG

Wie bei anderen Sensorgeräten auch kann die Genauigkeit des Sensors mit der Zeit graduell vom ab Werk eingestellten Sollwert abweichen. Damit Sie bei der Selbstkontrolle auch in Zukunft sicher fahren, empfiehlt Dräger, den Sollwert alle zwölf Monate neu einstellen zu lassen. Bei Bedarf steht Ihnen der Dräger-Service hierbei gern zur Verfügung.



D-1286-2009

Dräger Alcotest 3000
Einfach, präzise, schnell

DRÄGER ALCOTEST 3000



WEITERE VORTEILE:

- im Lieferumfang enthalten: Dräger Alcotest 3000, drei hygienisch einzeln verpackte Mundstücke, zwei Batterien, Handschlaufe und Tasche
- von Links- und Rechtshändern leicht zu bedienen
- Betrieb mit zwei handelsüblichen Alkali-Batterien (AA, 1,5 V) oder Akkus (AA, 1,2 V)
- niedriger Energieverbrauch: bis zu 1.500 Messungen mit nur einem Satz Batterien, Gerät schaltet sich nach vier Minuten Nichtgebrauch automatisch ab
- Ladezustand wird im Gerät angezeigt
- Zulassung: CE-Kennzeichnung
- jahrelange Messgenauigkeit durch professionelle Wartung

TECHNISCHE DATEN

Dräger Alcotest 3000

Messprinzip	Elektrochemischer Dräger-Sensor für 1/4"-Technik, alkoholspezifisch
Messbereich	0 bis 5,00 ‰; wenn die Grenzen des Messbereiches überschritten werden, wird eine Meldung angezeigt
Probenahme	Standard: automatische Probenahme bei Erreichen des Minimalvolumens
Betriebsbereitschaft	Ca. 6 Sekunden nach dem Einschalten
Anzeige der Messergebnisse	Nach ca. 3 Sekunden (bei 0,00 ‰); nach ca. 10 Sekunden (bei 1,00 ‰, Raumtemperatur)
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	10 bis 90 % relative Feuchte
Umgebungsdruck	700 bis 1200 hPa
Display	Grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung; 41 mm x 24 mm / 1.6" x 0.9" (128 x 64 Pixel)
LED	3 Leuchtdioden (LEDs) zur Unterstützung der Anzeige von Warnmeldungen
Akustisches Signal	Unterschiedliche Signaltöne zur Unterstützung von Meldungen und Warnungen auf dem Display
Stromversorgung	2 x AA-Batterien. Der Ladestatus wird angezeigt. Mit einem Batteriesatz können etwa 1.500 Atemtests durchgeführt werden.
Anpassen des Mundstücks	Mundstückaufnahme für Mundstücke „Standard“ (Slide 'n' Click). Orientierung nach rechts oder links möglich.
Mundstück	Hygienisch einzeln verpackt, mit manipulationssicherem, unblockierbarem Luftauslass, Mundstückauswerfer und Abstandhalter
Betriebskonzept	Messfunktionen können unter Verwendung von nur einer Taste ausgeübt werden
Kalibrierung	Nassgas- oder Trockengas-Kalibrierung
Gehäuse	Stoßfest ABS/PC
Abmessungen (H x B x T), Gewicht	Ca. 142 mm x 75 mm x 36 mm / 5.6" x 2.9" x 1.4", ca. 195 g, inkl. Batterien
Schwingungs- und Stoßfestigkeit	Erfüllt EN 60068-2-6, EN 60068-2-29
CE-Kennzeichnung	Richtlinie 89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit) für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

BESTELLINFORMATIONEN

Dräger Alcotest 3000

Dräger Alcotest 3000 (Messgerät, 3 Mundstücke, 2 Batterien, Handschlaufe, in Transporttasche)	83 20 470
Mundstücke „Standard“ (Slide'n'click)	
Packung mit 10 Mundstücken	68 12 287
Packung mit 100 Mundstücken	68 10 690
Packung mit 250 Mundstücken	68 10 825
Packung mit 1.000 Mundstücken	68 10 830
Alkalibatterie (1 Stück)	13 35 804

HAUPTSITZ

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

DRÄGER SERVICE**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-16
Fax 02151 37 35-29
service.westkr@draeger.com

REGION WEST

Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN**ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80
info.ch.sd@draeger.com