

Kurzbedienungsanleitung

Alkoholtester: AlcoREAL Cobra 588



15 Minuten keinen Alkohol trinken – Mund mit Wasser spülen – 5 Minuten vor dem Test nicht rauchen.

Mundstück aufsetzen – Taste „Test“ drücken. Eine Zahlenreihe läuft von 10 abwärts. Es ertönt ein Piepton und es erscheint „**---**“.
Jetzt kräftig, ca. 5 Sekunden ohne Unterbrechung pusten, bis kein Piepton mehr zu hören ist.


Nur wenn dieser Piepton nicht mehr hörbar ist ein mechanisch-pneumatischer fühlbarer Rückstoß erkennbar bar, wurde die Probe angenommen, andernfalls erscheint „Err“ für „Error“.

Nach dem Test, geht das Gerät in einen Stand-by-Mode und es erscheint im Display „**0000**“. Zum erneuten Test muss die Taste „Test“ erneut gedrückt werden. Den letzten Messwert kann man mit der rechten Taste nochmal anzeigen lassen. Das Gerät lässt sich durch Betätigung der linken Taste (mind. 2 Sekunden) ausschalten.

TECHNISCHE DATEN:

Anzeige:	4 Digitalzahlen (0000)
Sensor:	19mm Professional Fuel-Cell / elektrochemisch
Maße:	B x L x H – 67 x 124 x 28 mm
Gewicht:	150g mit Akku
Genauigkeit:	+/- 0,05% bei 0,5 Promille
Kalibrierung:	alle 12 Monate (weitere Infos unter www.trendmedic.de)
Garantie:	6 Monate auf Sensor, 24 Monate auf das Gerät

Tipps zum Akku-Wechsel

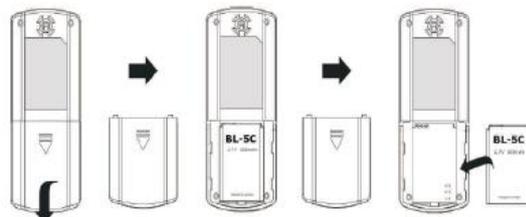

ACHTUNG: Deckel einschieben, auf keinen Fall eindrücken!

Wichtiger Hinweis: Die Grenzwerte für die Fahrtauglichkeit sind in den EU-Ländern unterschiedlich hoch. Unabhängig davon kann auch eine niedrige Blutalkoholkonzentration als z.B. 0,2 – 0,4 Promille zur Fahrtauglichkeit bzw. Strafbarkeit führen. In Deutschland muss bei Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille mit einer strafrechtlichen Verfolgung und einer event. Geldstrafe gerechnet werden. Der Alkoholtester TM-7500 ist kein amtliches Messgerät und kann deswegen **nicht** verbindlich dazu genutzt werden um festzustellen, ob eine Person nach dem Genuss von Alkohol ein Fahrzeug lenken oder eine Maschine bedienen kann. Messungen mit allen Atemalkohol-Vortestgeräten sind nicht für den "gerichtsfesten" Nachweis geeignet. Sie können Personen (z.B. Behörden) lediglich zur "Erhärtung" eines Anfangsverdachts dienen.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, nämlich "Cd" für Cadmium, "Hg" für Quecksilber und "Pb" für Blei.

Elektro- und Elektronikgesetz - ElektroG vom 16.03.2005
Entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes sind die Hersteller oder Importeure solcher Geräte zur korrekten Entsorgung verpflichtet. Bei diesem Alkoholtester handelt es sich um ein Gerät, das nach den Bestimmungen des § 2/8 und 9 dieses Gesetzes unter die Verpflichtung fällt, bei öffentlich rechtlichen Sammelstellen abgegeben zu werden. Trendmedic ist offiziell bei der Stiftung EAR (Elektro-Altgeräte-Register) unter WEEE-Reg.-Nr. DE84243170 registriert und führt entsprechende Beiträge für die gesetzeskonforme Entsorgung ab.

