

EMS ABS Fitness-Gürtel

EMS ABS Fitness-Gürtel

Der EMS ABS Fitness-Gürtel ist genau das, was für das Training der Bauchmuskulatur benötigt wird. Er verwendet leitfähiges Gummi zur Stimulation der Bauchmuskulatur und ist eine wirksame Alternative zu selbstklebenden Elektroden – besonders für Personen, die Schwierigkeiten haben, Elektrodenpads auf dem Bauch zu befestigen, oder die empfindlich auf selbstklebende Elektrodenpads reagieren.

Produktbeschreibung

Der Gürtel ist so konzipiert, dass die Elektrodenpads korrekt auf der Bauchmuskulatur positioniert werden. Er lässt sich einfach um den Bauch anlegen. Der Gürtel verfügt über vier leitfähige Elektrodenpads, die die Haut berühren und so die Muskulatur trainieren.

Verwendung zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs

Der tragbare Gürtel ermöglicht es, die Zielmuskulatur unter der Kleidung zu trainieren. Wenn Sie den EMS-Gürtel mit Befestigungsbändern tragen, können Ihre Muskeln gestrafft und gestärkt werden – egal ob Sie zu Hause sind, sich um das Baby kümmern, arbeiten oder unterwegs sind.

Gebrauchsanweisung

1. Die Haut muss stets sauber, feucht und frei von Lotion sein.
2. Stecken Sie den Schnappverbinder der Weichschnalle in den Metallschnapper, um den EMS ABS Fitness-Gurt zu verbinden (wie in der Abbildung dargestellt).
3. Legen Sie den Gürtel so an, dass sich die Elektroden an der richtigen Stelle des Bauches befinden.
4. Stellen Sie sicher, dass der Klettverschluss fest sitzt und die Elektroden eng am Bauch anliegen.
5. Vergewissern Sie sich, dass das EMS-Gerät ausgeschaltet ist. Stecken Sie das Kabelstecker in das EMS-Gerät. Schalten Sie nach dem Anschließen das EMS-Bauchgerät ein.
6. Schalten Sie beim Beenden der Anwendung zunächst das Stimulationsgerät aus. Entfernen Sie dann den Verbinder und den EMS ABS Fitness-Gürtel.

Hinweis: Der verwendete Bereich muss feucht gehalten werden.

△ Sicherheitshinweise

- Wenn Sie während der Anwendung Unbehagen oder Unregelmäßigkeiten spüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nicht auf verletzter Haut anwenden. Bei Hautbrennen die Nutzung sofort einstellen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Wenn die Elektrodenpads beschädigt sind, nicht verwenden.
- Den Stimulator gemäß den Geräte- und/oder Arztanweisungen einstellen. Schalten Sie zu Ihrer Sicherheit und für Ihren Komfort den Stimulator aus, bevor Sie den Gürtel vom Körper entfernen.
- Die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder hilfsbedürftige Personen kann gefährlich sein.
- Wenn Personen Hautirritationen durch die leitfähigen Elektrodenpads des Gürtels verspüren, die Nutzung des Gürtels einstellen.

Reinigung und Pflege

Waschen Sie das Produkt vorsichtig mit milder Seife in warmem (nicht heißem) Wasser. Spülen Sie es gründlich in warmem Wasser aus, um alle Seifenreste zu entfernen. Wickeln Sie das Produkt in ein Frottee-Handtuch, anstatt es auszuwringen, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Entfernen Sie das Handtuch und lassen Sie das Produkt bei Raumtemperatur, entfernt von Wärmequellen und Sonnenlicht, an der Luft trocknen.

Hersteller:

Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.

Adresse: 202, 2/F, Gebäude 27, Dafa Industriepark, Longxi Community, Longgang Street, Longgang Bezirk, Shenzhen, China

Tel: +86-755-23212776 | Fax: +86-755-23212776

E-Mail: info@roovjoy.com | Website: www.roovjoy.com

EU-Bevollmächtigter:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland

E-Mail: shholding@hotmail.com