

# Handschuhe

## Produktbeschreibung

Wenn Patienten unter Handschmerzen leiden, ist es schwierig, die Hand in irgendeiner Richtung zu beugen, was die Beweglichkeit der Hand beeinträchtigt. Daher ist es notwendig sicherzustellen, dass die TENS-Elektrode korrekt positioniert wird. Die Handschuhe verwenden leitfähige Silberfasern zur Stimulation der Hand – dies ist eine wirksame Alternative. Die Verwendung der Handschuhe erleichtert es Patienten, die über diese Beweglichkeit nicht verfügen, die Hand zu positionieren.

## Präsentation

Die Handschuhe sind so konzipiert, dass Elektroden problemlos an den schmerzenden Stellen der Hand platziert werden können. Sie sind einfach für Patienten um die Hand herum anzulegen.

## Nutzung zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs

Die tragbaren Handschuhe ermöglichen eine direkte, gezielte Handtherapie, sodass Patienten ihre Schmerzen reduzieren und zu einem aktiven Lebensstil zurückkehren können.

## Gebrauchsanweisung

1. Die Haut muss stets sauber, feucht und frei von Lotion sein.
2. Stecken Sie ein Ende des Kabels in die Metalldruckknöpfe, um die Handschuhe anzuschließen, und das andere Ende an das selbstklebende Elektrodenpad. Stellen Sie sicher, dass beide Enden ordnungsgemäß verbunden sind, um eine gute Leistung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Abbildung rechts.
3. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe optimal um die Hand positioniert sind. Das selbstklebende Elektrodenpad sollte einen Abstand von 40 mm zu den Handschuhen haben.
4. Stellen Sie sicher, dass das TENS-Gerät ausgeschaltet ist. Verbinden Sie den Kabelstecker mit dem TENS-Gerät. Schalten Sie das TENS-Gerät nach dem Anschluss ein.
5. Schalten Sie beim Beenden der Anwendung zuerst das TENS-Gerät aus. Entfernen Sie anschließend den Stecker und die Handschuhe.

**Der zu behandelnde Bereich muss feucht gehalten werden.**

## △ Sicherheitshinweise

- Wenn Sie während der Behandlung Beschwerden oder Unregelmäßigkeiten verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nicht auf verletzter Haut anwenden. Bei Hautbrennen sofort die Anwendung stoppen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Beschädigte Elektrodenpads dürfen nicht verwendet werden.
- Passen Sie den Stimulator gemäß den Geräteanweisungen und/oder den Anweisungen Ihres Arztes an Ihre Behandlung an. Schalten Sie den Stimulator zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort aus, bevor Sie versuchen, die Handschuhe zu entfernen.
- Die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder handlungsunfähige Personen kann gefährlich sein.
- Wenn einige Personen Hautreizungen durch die leitfähigen Silberfasern der Handschuhe verspüren, ist die Verwendung der Handschuhe sofort einzustellen.

## Reinigung und Pflege

Waschen Sie das Produkt zur Reinigung in warmem Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel – kein heißes Wasser verwenden. Entfernen Sie alle Spuren des Reinigungsmittels gründlich mit warmem Wasser und wringen Sie das Produkt nicht aus. Wickeln Sie es in ein Frotteehandtuch ein. Verwenden Sie ein Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Nehmen Sie das Handtuch ab und lassen Sie das Produkt bei Raumtemperatur an der Luft trocknen. Von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht fernhalten.

### Hersteller:

Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.

Adresse: 202, 2/F, Gebäude 27, Dafa Industrial Park, Longxi Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, China

Tel.: +86-755-23212776 | Fax: +86-755-23212776

E-Mail: [info@roovjoy.com](mailto:info@roovjoy.com) | Website: [www.roovjoy.com](http://www.roovjoy.com)

### EU-Bevollmächtigter (EC REP):

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland

E-Mail: [shholding@hotmail.com](mailto:shholding@hotmail.com)